

SOLO PRO



OPTO *prolens*



Il benessere degli occhi



Benessere degli occhi

www.optox.it

assistenza@servizioclienti.it
02 36 63 58 82

OPTOprolens®

Soluzione oftalmica a base di lipidure e ipromellosa,
senza conservanti



OPTOprolens® è una soluzione idratante e lubrificante per il trattamento dei disturbi oculari causati da stress ambientale, visivo e meccanico, particolarmente indicato durante il porto di lenti a contatto.

Benefici di OPTOprolens®

Lenti a contatto morbide:

Migliora l'idratazione delle lenti a contatto
Riduce la disidratazione delle lenti a contatto

Lenti a contatto rigide e semi-rigide:

Aumenta la bagnabilità delle lenti a contatto



L'uso di **OPTOprolens®** durante il porto delle lenti a contatto, di qualsiasi tipo, consente di migliorare e prolungare il comfort, e di garantire una elevata protezione alla superficie oculare, anche in condizioni non ottimali come:

- scarsa lacrimazione;
- uso delle lenti a contatto davanti a PC, Smartphone, Tablet;
- uso delle lenti in ambienti secchi (es. aria condizionata), ventosi o polverosi.

I consigli di OPTO^X sulle modalità d'uso:

- Lavare accuratamente le mani prima di interagire con le lenti a contatto e gli occhi
- Prima di indossare le lenti a contatto, instillare 1 goccia nel lato interno della lente e poi applicarla sull'occhio
- Durante il porto instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale, 2 volte al giorno o più, secondo necessità
- Prima di rimuovere le lenti a contatto instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale, ammiccare alcune volte e poi procedere con la rimozione

